

# 가이드 ② 스마트로그 연동

## 케어센스® N IoT

Blood Glucose Monitoring System



© 2020 i-SENS, Inc. All Rights Reserved.


PGUAB-000017 REV3 2020/11

### 스마트로그 연동가이드 Summary

1. 스마트폰에 스마트로그(SmartLog) 앱을 설치해 주세요.  
Google Play 또는 App Store 에서 '스마트로그' 검색 또는 아래 QR코드로 다운로드
2. 스마트로그 앱에서 SKT 통신망 연동을 위한 개통을 진행해 주세요.  
\* 별도로 동봉된 SKT 개통가이드 참조
3. 개통 완료 후, 스마트로그 앱으로 돌아와 등록하기를 클릭해 주세요.
4. 등록을 위해 스마트로그 계정으로 로그인해 주세요.
5. 혈당측정기의 인증번호를 앱 화면에 입력하면 등록이 완료됩니다.
6. 등록 이후, 혈당측정 시 혈당측정값이 앱으로 자동전송 됩니다.  
\* 상세한 내용은 각각의 이미지와 그 아래 설명을 참조해 주세요.



### 1. 혈당측정기와 스마트로그앱 연동하기

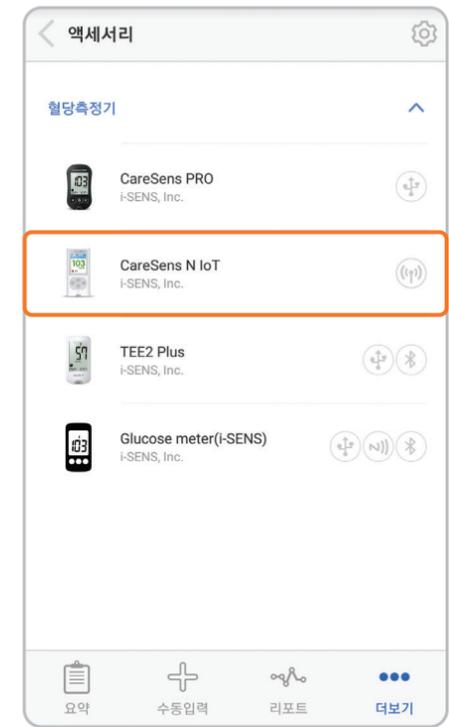


① [스마트로그] 앱에서 더보기 → 액세서리 → 혈당측정기의 CareSens N IoT기기를 선택합니다.




② [스마트로그] 개통 완료 후, 스마트로그 앱으로 돌아오면 개통 완료 페이지가 나타나며, 아래 등록하기를 눌러 연동을 진행합니다.

\* 상세한 개통 방법은 별도로 동봉된 SKT 개통가이드 참조해 주세요.

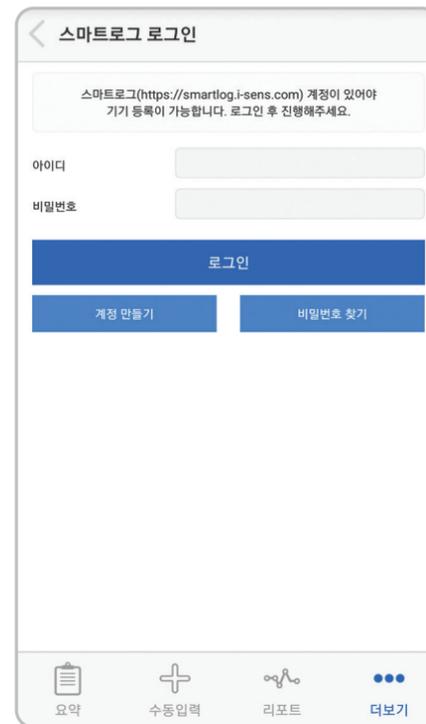


③ [스마트로그] 등록을 위해 스마트로그 계정으로 로그인합니다.

\* 계정이 없을 경우, 회원가입을 먼저 진행해 주세요.  
\* 기존에 로그인 되어있는 경우, 위 화면이 보이지 않고 다음 화면으로 넘어갑니다.

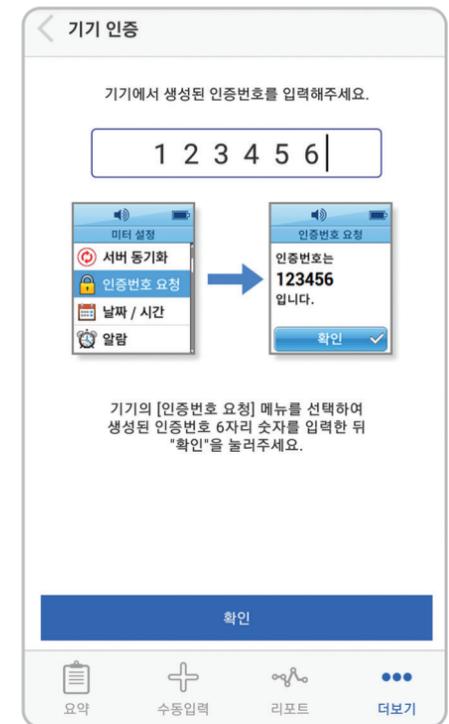


④ [혈당측정기] 전원을 켜 후, 메뉴의 미터 설정 → 인증번호 요청을 차례로 누르면 혈당측정기의 화면에 6자리 숫자가 나타납니다.

## 2. 혈당측정값 데이터 전송하기

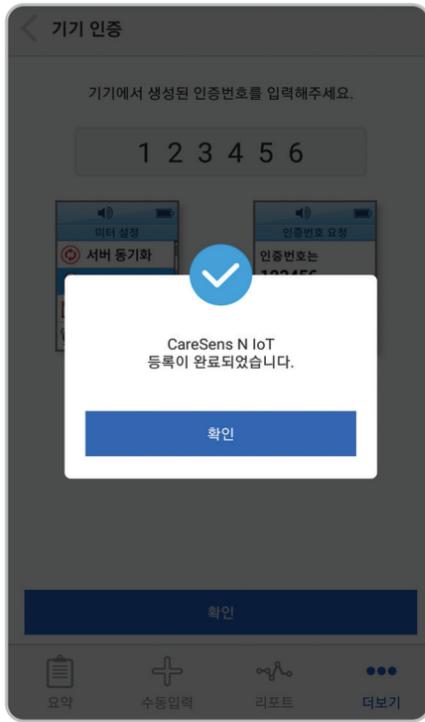

⑤ [스마트로그] 인증번호 6자리를 앱 화면에 입력하고, 확인을 누르면 등록이 완료됩니다.

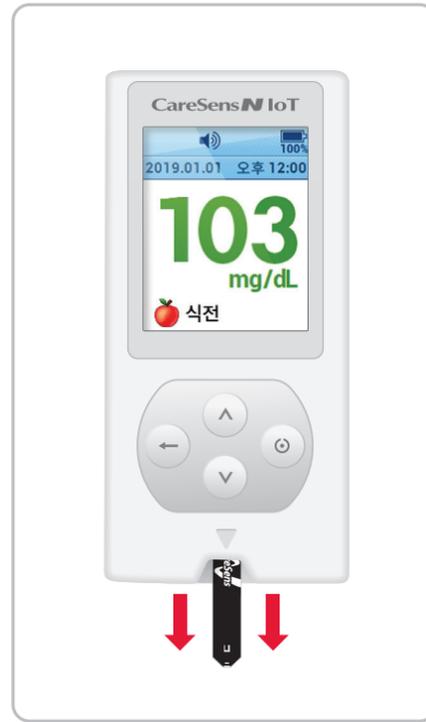


① [혈당측정기] 혈당측정 후, 검사지를 제거하면 혈당측정값 자동전송이 시작됩니다.

\* 혈당측정 전, 식사상태(공복/식전/식후/취침 전/선택 안 함)를 선택하면 체계적인 혈당관리에 도움이 됩니다.




② [혈당측정기] 혈당측정값은 스마트로그 앱에 자동전송되어 바로 확인할 수 있습니다.

## 3. 혈당측정기와 스마트로그앱 연동 해제하기

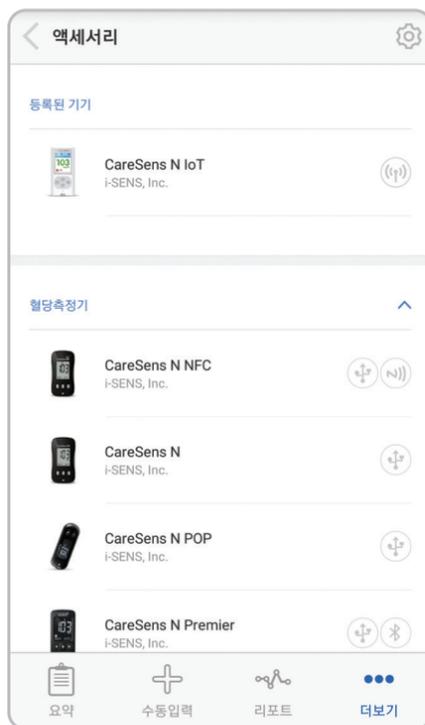


① [스마트로그] 더보기 → 액세서리 → 등록된 기기 중 CareSens N IoT를 차례로 선택하면, 3가지 연결 해제 버튼이 나타납니다. 해제가 완료되면 액세서리의 등록된 기기 란에 CareSens N IoT 혈당측정기가 삭제됩니다.

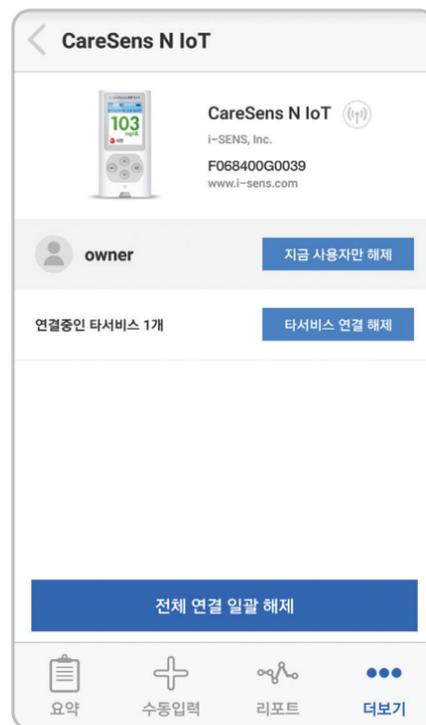

② [스마트로그] 지금 사용자만 해제: 혈당측정기와 스마트로그앱의 연동을 해제하고 싶을 때 누릅니다.

③ [스마트로그] 타서비스 연결 해제: 스마트로그 앱 외에 연결된 타서비스와의 연동을 해제하고 싶을 때 누릅니다.

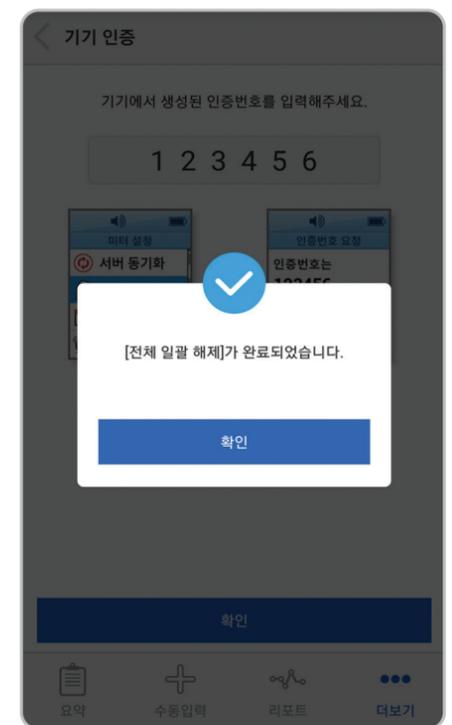

④ [스마트로그] 전체 연결 일괄 해제

\* 타서비스와 전체 연결 해제 시에는 혈당측정기의 인증번호 6자리를 입력해야 해제가 완료됩니다. 혈당측정기 메뉴의 미터설정 → 인증번호 요청을 차례로 눌러 6자리 숫자를 입력해 주세요.